



**Bellovac® ABT**  
YOUR OWN BLOOD™

## STARTA UPP

Öppna förpackningen på ett aseptiskt sätt.

Sätt katetern på plats. Ta bort troakaren, fixera katetern och anslut katetern till bälgens inloppsslang.

1. För att evakuera luft från operationsområdet, stäng inloppsslangens klämma.
2. Pressa ihop bälgen.






3. Öppna inloppsslangens klämma igen. Upprepa proceduren tills blodet börjar rinna eller tills bälgen förblir ihoptryckt när den släpps.
4. Stäng utloppsslangens klämma.

Vid blodtomt fält: Undvik koagel genom att stänga inloppsslangens klämma efter det att bälgen presats ihop sista gången. Öppna klämman igen ca 15 minuter efter det att stasen har släppts.

5. Ta bort beröringsskyddet i påsens inlopp.

6. Sätt fast autotransfusionspåsen på bälgens utloppsslang med hjälp av skruvkopplingen.
7. Märk påsen med patientens identitet, tid då uppsamlingen startar och fastställd tid när uppsamlingen skall avslutas (uppsamlingen av blod skall vara avslutad inom 6 timmar efter det att den startade).

8. Häng Bellovac ABT upprätt. Använd t ex upphängningsbandet. Skicka transfusionsaggregatet tillsammans med patienten till den postoperativa avdelningen.

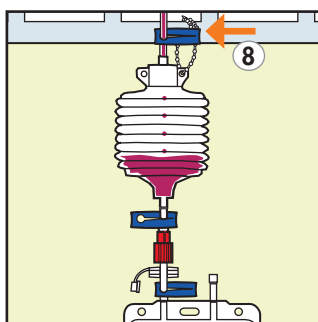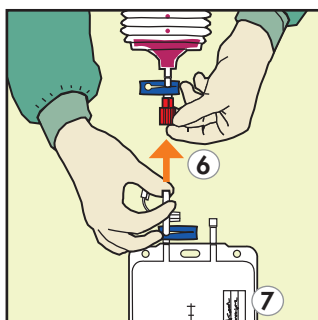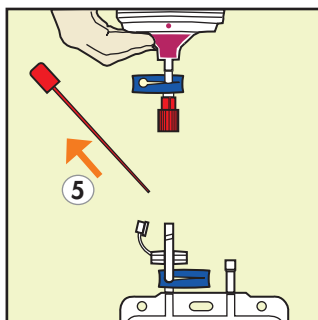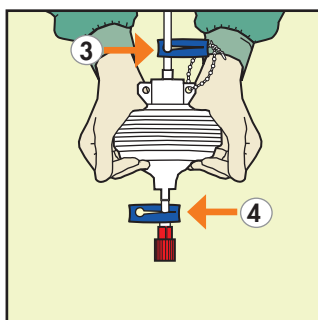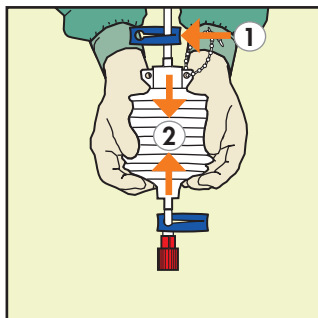

STARTA UPP




# UPPSAMLING AV BLOD


## Uppsamling av blod

Se till så att autotransfusionspåsen är ordentligt märkt med patientens identitet, tid då uppsamlingen började och fastställd tid då uppsamlingen skall vara avslutad.

1. För att tömma bälgens innehåll i autotransfusionspåsen stänger man bälgens inloppsklämma.
2. Öppna utloppsslangens klämma.

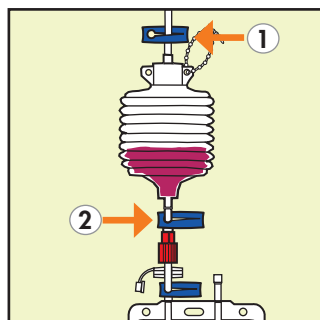


3. Pressa långsamt ihop bälgens med handflatorna så att vätskan rinner över till påsen.
4. Stäng utloppsslangens klämma.
5. Öppna inloppsslangens klämma för att fortsätta dräneringen.

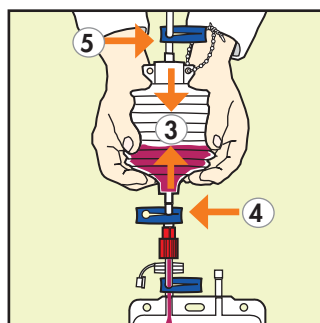


## Byte av påse

Se till att bälgens utloppsklämma är stängd.


6. Stäng klämman på påsens inlopp.
7. Ta bort den fyllda autotransfusionspåsen.
8. Sätt på skyddshättan som är fäst vid påsens inlopp.

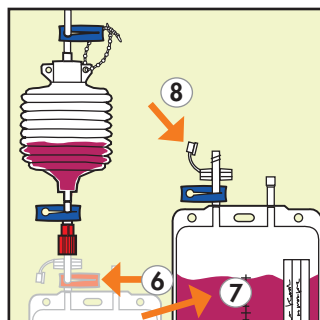

9. Anslut en ny påse genom att skruva fast den ordentligt i skruvkopplingen. Undvik kontaminering.
10. Märk den nya påsen med samma tider som originalpåsen och skriv ett nytt nummer på påsen.

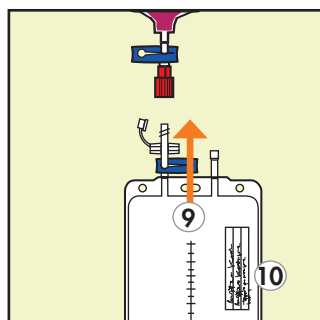

11. Efter 6 timmars bloduppsamling **måste** autotransfusionspåsen bytas ut till en standardpåse. Bytet av påse utförs enligt instruktion, se ovan punkt 7–8–9.

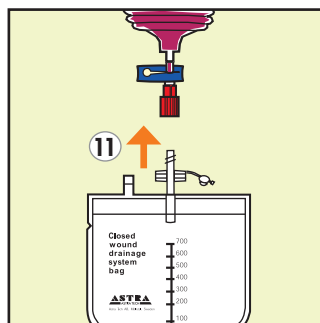




# REINFUSION


Öppna transfusionsaggregatet aseptiskt.

1. Sätt slangklämman på transfusionsaggregatet intill droppkammaren och stäng.
2. Ta bort skydden från spetsen på aggregatet och autotransfusionspåsens utlopp.
3. Sätt fast spetsen på aggregatet i utloppet.

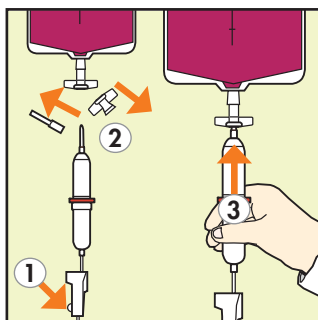


Ta bort eventuell luft från autotransfusionspåsen och fyll filtret och droppkammaren:

4. Vänd på transfusionsaggregatet och autotransfusionspåsen.
5. Öppna slangklämman.
6. Tryck försiktigt ihop autotransfusionspåsen (baklänges-priming).
7. Fyll upp till markeringen på droppkammaren.
8. Stäng slangklämman och se till att nivån bibehålls i droppkammaren.

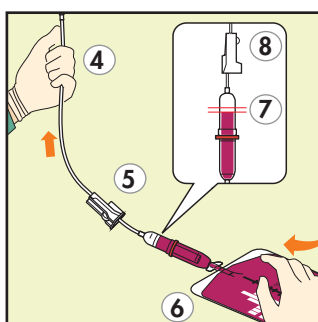


9. Häng autotransfusionspåsen på droppställningen.

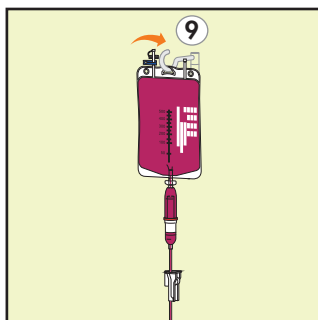


10. Öppna slangklämman försiktigt och avlägsna all luft från transfusionsslangen.

*OBS! När luften avlägsnas måste transfusionsslangen kopplas loss från patientens IV-kanyl.*

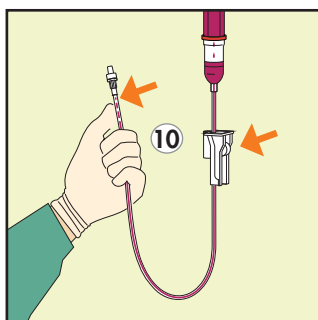

11. Stäng slangklämman.
12. Ta bort skyddslocket från änden av transfusionsslangen.

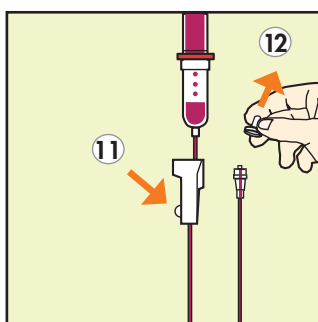

Anslut transfusionsslangen till patientens IV-kanyl. Öppna slangklämman för att starta reinfusion.



**Bellovac® ABT**  
YOUR OWN BLOOD™

# FÖRLÄNGNINGSSLANG

Förlängningsslangen används som förlängning mellan Bellovac ABT utlopp och autotransfusionspåsen. Används vid önskemål om att blodet skall förbli i obruten cirkulation (av religiösa skäl) under bloduppsamling och reinfusion.

## Monteringsanvisning

Gå igenom punkt 1–4 i Starta upp-instruktionen. Koppla därefter förlängningsslangen mellan Bellovac ABT utlopp och autotransfusionspåsen med hjälp av skruvkopplingen. Fortsätt med punkt 7 i Starta upp-instruktionen. Om transfusionsaggregatet ansluts till venpunktionsställe (patienten) innan det fylls med blod skall det fyllas med koksaltlösning.

## Uppsamling av blod





Låt båda klämmorna på förlängningsslangen vara öppna och använd sugbälgens inlopps- och utloppsklämmor som finns beskrivet under Uppsamling av blod, punkt 1–5.

## Autotransfusion

Kontrollera att följande klämmor är stängda före reinfusion: bälgens utloppsklämma, inlopps- och utloppsklämmorna på förlängningsslangen och inloppsklämman på autotransfusionspåsen. Följ noggrant anvisningen för reinfusion.

## Byte av påse och förlängningsslang

Om en andra enhet blod ska samlas upp och reinfuseras **måste** förlängningsslangen, autotransfusionspåsen och transfusionsaggregatet bytas. För att blodet hela tiden skall vara i kontakt med kroppen; starta reinfusionen innan du byter ut förlängningsslangen och autotransfusionspåsen. Kontrollera att utloppsklämman på bälgen är stängd. Stäng inlopps- och utloppsklämmorna på förlängningsslangen och inloppsslangen på autotransfusionspåsen. Tag bort den använda förlängningsslangen, autotransfusionspåsen och transfusionsaggregatet och anslut nya, se instruktion Starta upp.

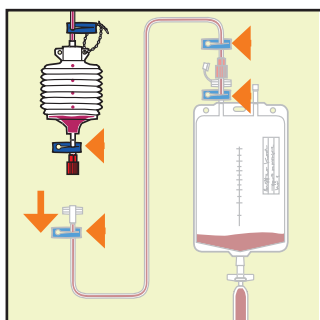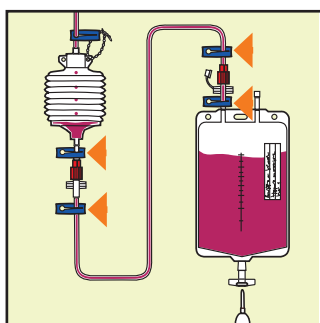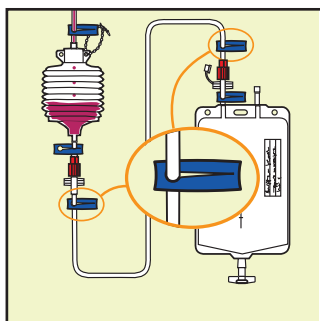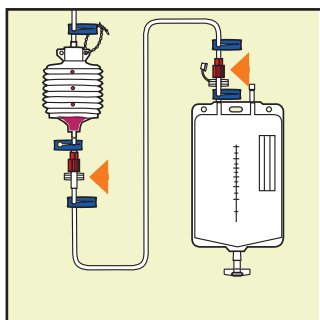

FÖRLÄNGNINGSSLANG



**Bellovac® ABT**  
YOUR OWN BLOOD™

## Bellovac ABT produktsortiment

### Bellovac® ABT Set

- Ref.nr 68396 Bellovac® ABT Set FG10 med troakar  
Ref.nr 68397 Bellovac® ABT Set FG14 med troakar  
Ref.nr 68398 Bellovac® ABT Set FG18 med troakar

### Bellovac® ABT tillbehör

- Ref.nr 68376 Y-koppling och kateter FG 10  
Ref.nr 68385 Y-koppling och kateter FG 10 med troakar  
Ref.nr 68377 Y-koppling och kateter FG 14  
Ref.nr 68386 Y-koppling och kateter FG 14 med troakar  
Ref.nr 68378 Y-koppling och kateter FG 18  
Ref.nr 68387 Y-koppling och kateter FG 18 med troakar  
Ref.nr 68379 Kompletterande set (autotransfusionspåse och transfusionsaggregat)  
Ref.nr 68380 Förlängnings slang  
Ref.nr 68381 Transfusionsaggregat  
Ref.nr 68337 Utbytes dränagepåse – PVC-fri

CE 0088

STERILE EO



Manufactured by: Astra Tech AB, Box 14, 431 21 Mölndal  
Tel: 031-776 30 00. Fax: 031-776 30 10  
Internet: [www.astratech.com](http://www.astratech.com)

**ASTRA**  
ASTRATECH

 A company in the  
AstraZeneca Group

Astra Tech AB, Marknad Sverige, Box 14, 431 21 Mölndal.  
Kundservice: 031-776 30 20. Fax 031-776 30 17. [www.astratech.se](http://www.astratech.se)